

# Краткая инструкция по развертыванию и первому запуску Инобитек Web DICOM-Просмотрщика 2.10 для Windows и Ubuntu 20

1. **Распакуйте архив** в отдельную папку.
2. **(Необязательно) Настройте пути.** В файле `renderserverconfig.json` вы можете изменить расположение хранилища и файла базы данных SQLite.
3. **(Необязательно) Настройте параметры сервера.** В файлах `control.json` и `storage.json` можно изменить сетевые порты и другие параметры работы Web-Просмотрщика.
4. **Запустите сервер.** Для Windows выполните `RenderServer.exe`, для Linux — запустите исполняемый файл `RenderServer`. При первом запуске база данных создаётся автоматически. Чтобы программа продолжала работать, не закрывайте терминал или окно, в котором она запущена.
5. **Настройка безопасности системы.**
  - **Для Windows:** если появится окно с предупреждением файрвола Windows, нажмите "Разрешить".
  - **Для Linux** откройте следующие порты:
    - 8090 (по умолчанию) — для доступа к веб-интерфейсу;
    - 3000 (по умолчанию) — для обмена данными с PACS-серверами в режиме C-MOVE.
  - Убедитесь, что RenderServer добавлен в исключения антивирусного ПО.
6. **Установка зависимостей (только для Windows).** Если пакет Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 не установлен, скачайте установочный файл:
  - [Официальный сайт Microsoft](#)
  - [Сайт Инобитек](#)
7. **Откройте панель администратора.** В веб-браузере перейдите по адресу: `http://localhost:8090/admin`. Если порт был изменён, используйте актуальное значение. Для удалённого доступа замените `localhost` на IP-адрес или доменное имя компьютера, на котором запущен RenderServer.
8. **Войдите в систему.** Используйте учетные данные `admin/admin`.
9. **Активируйте лицензию.** Воспользуйтесь пробным периодом (недоступно для виртуальных машин) или введите имеющуюся лицензию.
10. **(Необязательно) Дополнительные настройки.** Вы можете:
  - изменить пароль администратора;
  - управлять пользователями;
  - настроить список общих PACS-серверов;
  - указать AE Title (SCU) Web-Просмотрщика;
  - выполнить другие настройки.
11. **Перейдите в интерфейс пользователя.** В веб-браузере перейдите по адресу: `http://localhost:8090`. Если порт был изменён, используйте актуальное значение. Для удалённого доступа замените `localhost` на IP-адрес или доменное имя компьютера, на котором запущен RenderServer.
12. **Начните работу.** Войдите в систему как `user/user` (или другой пользователь, созданный в панели администратора) для использования программы.

## Полезные ссылки:

[Руководство администратора](#)

[Руководство пользователя](#)

За поддержкой обращайтесь по электронному адресу [support@inobitec.com](mailto:support@inobitec.com).